



Hoja rotatoria cortante por todos los bordes

Manipulación ergonómica

# Rascador óseo

Para la obtención segura y eficaz de hueso autólogo

El rascador óseo permite obtener de manera segura y eficaz fragmentos de hueso cortical autólogo para su aplicación en procedimientos regenerativos de la cirugía maxilofacial.

Gracias a su hoja redondeada, el rascador óseo puede utilizarse sobre superficies con diferente morfología (planas, cóncavas o convexas).

## Características del producto

- La posibilidad de rotar la hoja 360 grados permite contar con cuatro bordes cortantes para maximizar la obtención de hueso
- Mango ergonómico para un agarre confortable y el control durante el uso
- Obtención sencilla y rápida de hueso para un mayor confort del paciente



Tamaño original

## Modo de empleo



Presione firmemente el extremo anterior del dispositivo contra la superficie del hueso y tire hacia atrás.



Empuje suavemente la cámara transparente hacia delante con el dedo para abrirla y recoger las virutas de hueso con un instrumento.



Si la hoja se vuelve roma, utilice un destornillador hex de 1.2 mm para girarla 90 grados y tener un nuevo borde afilado.

## Información para pedidos

Referencia	Artículo	Tamaño de envase
<b>BSF-5P</b>	Raspador óseo, estéril, desechable	5 unidades

Nuestros servicios y nuestras entregas se rigen exclusivamente por nuestras condiciones generales.



### Distribuidor

BioHorizons Ibérica S.R.L. | Calle Oruro, 9 - 1º izq | 28016 Madrid | España  
Teléfono +34 91 713 10 84 | pedidos@biohorizons.com | www.biohorizonscamlog.es

### Headquarters

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basilea | Suiza  
Teléfono +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.bhclgroup.com

Fabricante legal del raspador óseo:  
OSUNG MND CO., LTD. | 57, Hwanggeum-ro 109 beon-gil | Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do 10048 | Corea