



truFIX System – La solución
integral de fijación del hueso y
estabilización de la membrana

Válido a partir de enero de 2023


truFIX – el sistema completo

Para el anclaje primario de bloques y placas de hueso y de membranas

truFIX System, distribuido por BioHorizons Camlog, le ofrece todo lo que necesita para fijar bloques y placas de hueso y estabilizar membranas. El sistema incorpora todos los componentes necesarios para recoger e insertar truSCREW y truTACK. Con el sistema truFIX ya no es necesario disponer de múltiples sistemas y componentes, por lo que es muy sencillo de usar en la clínica.

Características

- Conexión de bloqueo patentada centrada real
- Alineación axial real con recogida todas las veces
- Tornillo autoperforante truSCREW desarrollado para la fácil inserción con máxima fijación
- Manguito de remoción patentado truSCREW para soltar el tornillo de la llave de inserción sin dañar la cabeza del tornillo
- Cabeza de llave de inserción para implantes hexagonal truTACK y punta con aletillas para perforar sin fresar e insertar fácilmente las chinchetas de fijación y retirar con facilidad como un tornillo
- Fácil inserción y extracción de truTACK como un tornillo

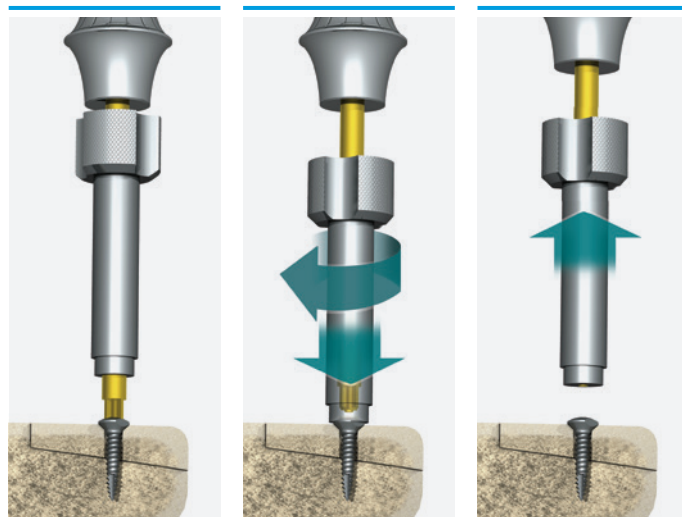

La conexión de bloqueo centrada real de la llave de inserción sujeta de forma segura el truSCREW. La funda de remoción desacopla la llave de inserción del tornillo sin comprometer el tornillo o la estabilidad del injerto.

El sistema truFIX incluye:

- 1 Bandeja truFIX (vacía)
- 2 Mango de llave de inserción truFIX, 98 mm (3.875") de largo
- 3 Punta de llave de inserción truTACK (incluye tapa de la punta azul)
- 4 Punta de llave de inserción truSCREW
- 5 Funda de remoción de llave de inserción truSCREW
- 6 Punta de llave de inserción truSCREW, contraángulo
- 7 Fresa de avellanar CA 2 pasos, pasos 0.8 mm y 1.6 mm
- 8 Fresa piloto helicoidal 1.1 mm, 29.8 mm
- 9 Fresa piloto, 0.45 mm, 27 mm de largo, contraángulo
- 10 Llave de inserción manual hexagonal externa de 0.88 mm
- 11 Herramienta de remoción de embalaje truSCREW

(también disponible por separado)



Opcional:

Mango de llave de inserción truFIX pequeño, 89 mm (3.5") de largo

(se vende por separado)




truTACK, truSCREW y truTENT

Chinchetas de fijación ósea, tornillos óseos autopercutores y tornillos de fijación tenting

Con **truTACK**, estabilizar las membranas es rápido y sencillo. Nuestra exclusiva chincheta de fijación incorpora un hexágono en la cabeza, y las roscas del vástago permiten una fácil extracción. truTACK se coloca igual que una chincheta de fijación y se retira como un tornillo. Ningún otro sistema tiene esta característica.

truSCREW, con sus agresivos filetes cortantes, es el tornillo óseo idóneo para fijar el hueso pequeño en el entorno oral y maxilofacial. Con estos filetes cortantes (en la mayoría de los casos) no es necesario el fresado cónico. El diseño patentado del tornillo garantiza la colocación sin esfuerzo en todos los tipos de hueso.

truTENT es una versión mejorada de truSCREW. Su cuello alto y su cabeza más ancha están diseñados para soportar una membrana o una malla de titanio durante los procedimientos de aumento.

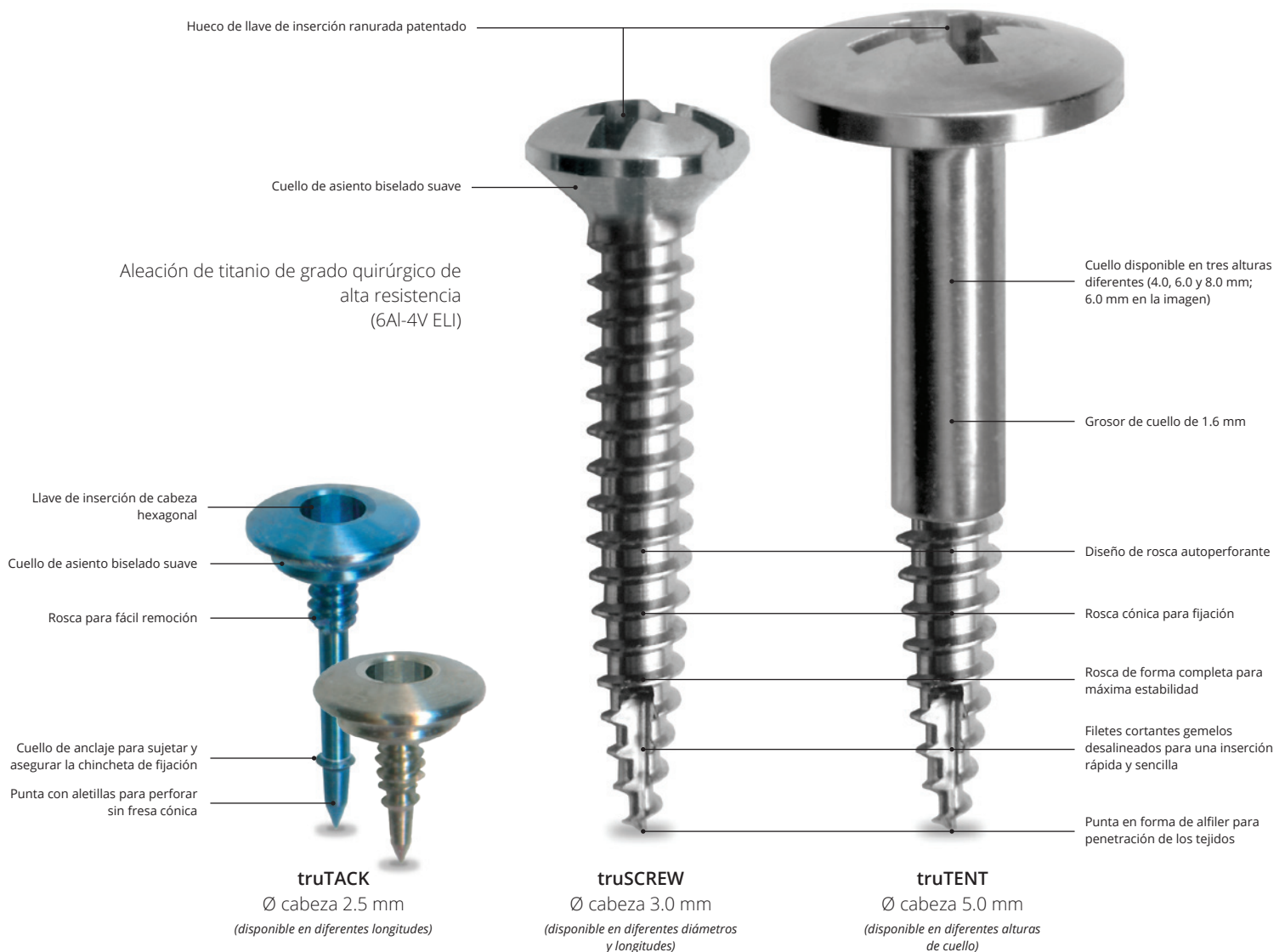


Mallas de titanio

Grado 1


El uso de mallas de titanio resulta ventajoso para la reconstrucción de defectos óseos de la cresta alveolar extensos combinados. Actúan como una jaula para mantener el espacio creado para el aumento para la regeneración. Las mallas se adaptan intraoperatoriamente al defecto, se rellenan con material de aumento y se fijan en una posición estable

con tornillos. No tienen función de barrera. Las mallas de titanio están disponibles en distintos tamaños y estructuras como mallas planas. Dependiendo de la indicación, la implantación se puede realizar en uno o dos lados.

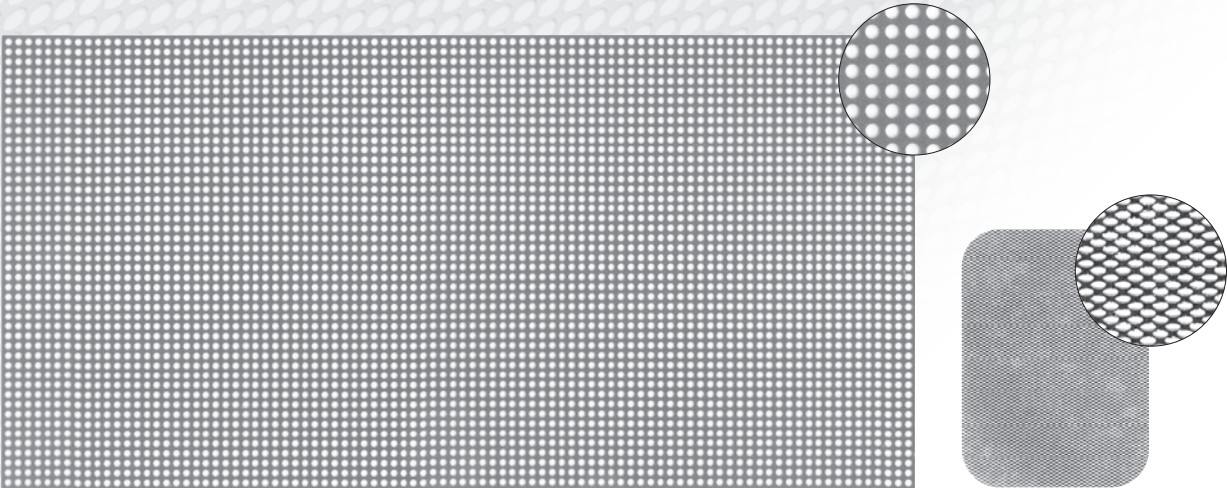


Micromalla de titanio
120 × 60 mm, 0.1 mm grosor

Micromalla de titanio
34 × 25 mm, 0.1 mm grosor

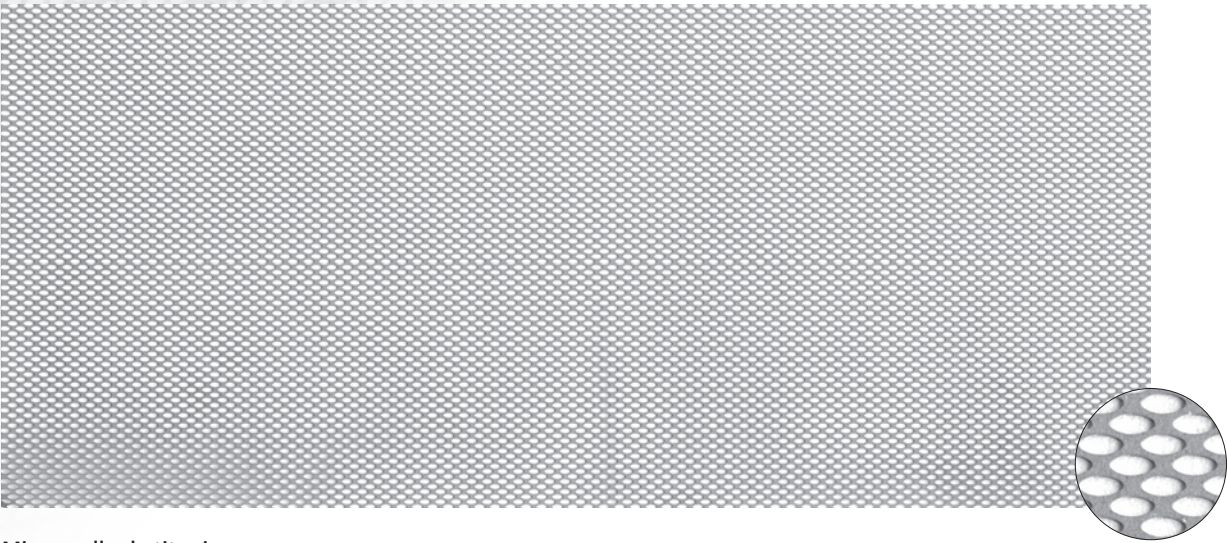

Micromalla de titanio
152 × 66 mm, 0.2 mm grosor

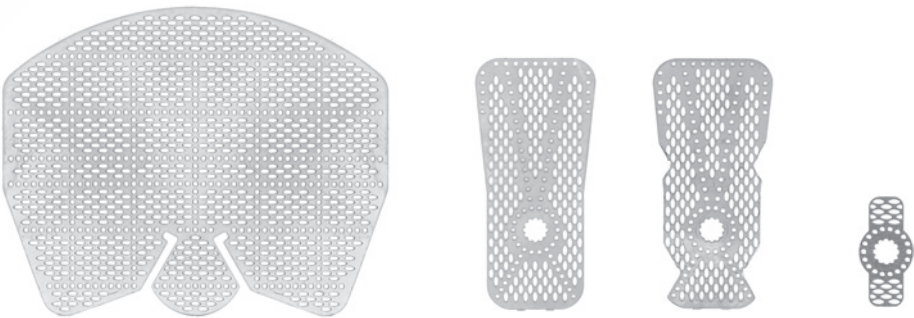

Malla de titanio sencilla de mariposa de tenting
30 × 80 mm, 0.25 mm grosor

Malla de titanio de tenting / Malla de titanio de tenting personalizada
13 × 33 mm, 0.2 mm grosor

Malla de titanio de tenting
7 × 14 mm, 0.2 mm grosor

Información para pedidos

Sistema truFIX



Sistema truFIX (completo)

Referencia	Artículo
45418015	Sistema truFIX (incluye bandeja/ instrumentos 1-11)



Bandeja/instrumentos del sistema truFIX

Referencia	Artículo
45418501	1 Bandeja truFIX (vacía)
45419001	2 Mango de llave de inserción truFIX, 98 mm (3.875") de largo
45417001	3 Punta de llave de inserción truTACK (incluye tapa de la punta azul)
45415001	4 Punta de llave de inserción truSCREW
45417901	5 Funda de remoción de llave de inserción truSCREW
45415201	6 Punta de llave de inserción truSCREW, contraángulo
45440203	7 Fresa de avellanar CA 2 pasos, pasos 0.8 mm y 1.6 mm
45440202	8 Fresa piloto helicoidal 1.1 mm, 29.8 mm
502700045	9 Fresa piloto, 0.45 mm, 27 mm de largo, contraángulo
20157702	10 Llave de inserción manual hexagonal externa de 0.88 mm
45450201	11 Herramienta de remoción de embalaje truSCREW
45419501	Mango de llave de inserción pequeño truFIX, 89 mm (3.5") de largo (opcional)

Productos auxiliares

(Solicitar por separado)

Mallas de titanio (grado 1, no estéril, no reabsorbible)



Referencia	Artículo
39429	Micromalla de titanio, 34 × 25 mm, 0.1 mm de grosor
39430	Micromalla de titanio, 120 × 60 mm, 0.1 mm de grosor
39433	Micromalla de titanio, 152 × 66 mm, 0.2 mm de grosor
39434	Malla de titanio de tenting, 7 × 14 mm, 0.2 mm de grosor
39440	Malla de titanio de tenting, 13 × 33 mm, 0.2 mm de grosor
39442	Malla de titanio de tenting personalizada, 13 × 33 mm, 0.2 mm de grosor
39444	Malla de titanio sencilla de mariposa de tenting, 30 × 80 mm, 0.2 mm de grosor

truTACK, caja de 10 (Ø cabeza 2.5 mm, estériles, desechables)



Referencia	Ø rosca/longitud total
9600313	0.7 mm / 3.0 mm
9600314	0.7 mm / 5.0 mm

truSCREW, caja de 5 (Ø cabeza 3.0 mm, estériles, desechables)



Referencia	Ø rosca/longitud total
45427202	1.2 mm / 4.5 mm
45427203	1.2 mm / 6.0 mm
45427204	1.2 mm / 7.5 mm
45427205	1.2 mm / 9.0 mm
45427206	1.2 mm / 10.5 mm
45427502	1.5 mm / 6.0 mm
45427503	1.5 mm / 7.5 mm
45427504	1.5 mm / 9.0 mm
45427505	1.5 mm / 10.5 mm
45427506	1.5 mm / 12.0 mm
45427507	1.5 mm / 13.5 mm
45427508	1.5 mm / 15.0 mm
45428002	2.0 mm / 6.0 mm
45428003	2.0 mm / 7.5 mm
45428004	2.0 mm / 9.0 mm
45428005	2.0 mm / 10.5 mm
45428006	2.0 mm / 12.0 mm
45428007	2.0 mm / 13.5 mm
45428008	2.0 mm / 15.0 mm

truTENT (Ø cabeza 5.0 mm, estériles, desechables)



Referencia	Ø rosca / longitud total / altura del cuello
454391001	1.5 mm / 10.0 mm / 4.0 mm
454391002	1.5 mm / 12.0 mm / 6.0 mm
454391003	1.5 mm / 14.0 mm / 8.0 mm

España y Portugal

BioHorizons Camlog Ibérica | C/Oruro, 9 – 1º | 28016 Madrid | España
www.biohorizonscamlog.es

Atención al cliente

Teléfono +34 91 7131 084 | Fax +34 91 3558 375 | iberica@biohorizons.com

Headquarters

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basilea | Suiza
Teléfono +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.biohorizonscamlog.com

truFIX, truTACK, truSCREW, truTENT y las mallas de titanio son fabricados por ACE Surgical Supply Co., Inc.
BioHorizons® es una marca comercial registrada de BioHorizons. Todos los derechos reservados.
No todos los productos que se muestran o describen en este documento están disponibles en todos los países.

Inspiring excellence in oral reconstruction

